

ISTRUZIONI PER L'USO

Maschera Facciale EN 14683:2019 TIPO II R

ISTRUZIONI PER L'USO (rev.01 del 25/05/2021):

Lavarsi le mani.

Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca.

La striscia metallica deve essere posizionata verso l'alto.

Inserire le dita in entrambi gli elastici (dalla parte esterna) e aprendo la mascherina portare gli elastici dietro le orecchie .

Premere e adattare la striscia metallica su entrambi i lati con le dita anteriori e medie di entrambe le mani alla forma del naso.

Tirare la mascherina nel punto inferiore della mascella per lasciare uno spazio tridimensionale.

Verifica della tenuta: coprire la mascherina leggermente con entrambe le mani; respirare liberamente; l'aria non deve fuoriuscire dal lato della mascherina.

Controllo della pressione negativa: coprire la mascherina leggermente con entrambe le mani, aspirare con decisione.

La mascherina deve essere premuta intensamente verso l'interno.

AVVERTENZE:

Le mascherine usate sono considerate altamente contaminate, è essenziale che:

- Il corpo della mascherina non sia toccato dalle dita/mani di chi lo indossa;
- Le mani siano disinfettate (disinfezione completa delle mani) dopo la rimozione della mascherina;
- La mascherina deve coprire il naso e la bocca di chi la indossa, in nessun momento una mascherina deve essere appesa attorno al collo di chi la indossa;
- Una mascherina usata dovrebbe essere smaltita quando non è più necessaria o tra due procedure;
- Quando c'è un'ulteriore necessità di protezione si dovrebbe indossare una nuova mascherina;
- Non bagnare la mascherina;
- Non utilizzare la mascherina se la confezione o la mascherina è danneggiata;
- Tenere lontano da fiamme libere o eccessive fonti di calore;
- Non riutilizzare il dispositivo;
- Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto.


CONTROINDICAZIONI:

Non usare su soggetti con ridotta capacità respiratoria.

Non utilizzare su soggetti con manifesta sensibilità ai materiali della mascherina.

SMALTIMENTO:

Una volta usate, le mascherine monouso debbono essere immediatamente smaltite nella spazzatura.

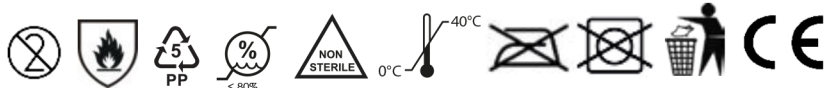

REF MAS15/04/SRD/C/DM